



OBSERV[®]

Bildbasierte Hautanalyse
der neusten Generation.

OBSERV® – Eine Lichtreise durch die Haut

Tiefer blicken. Klarer sehen.
Gezielter behandeln.

Die Analyse des wahren Hautzustandes mit dem Observ beginnt mit einer einzigartigen Reise durch die verschiedenen Hautschichten. Die äußerste Schicht der Epidermis ist die einzige Schicht, die für die Augen sichtbar ist. Dank seiner verschiedenen patentierten LEDs und Filter ermöglicht der Observ ein klares Verständnis für den Hautzustand Ihrer KundInnen über alle Hautschichten hinweg. So können für verschiedene Hautprobleme die passenden Behandlungsmethoden leichter identifiziert werden.

Mit Hilfe des Observ überzeugen Sie Ihre KundInnen ganz einfach davon, sich stärker mit ihren Hautbedürfnissen zu beschäftigen. Die anschaulichen Bilder des Gesichts und die visuelle Dokumentation von Hautproblemen machen Ihre Analyse noch besser nachvollziehbar. Dadurch schaffen Sie mehr Vertrauen und können Ihren Umsatz durch gezielte Treatment-Lösungen und Produktverkäufe noch mehr steigern.

Den Observ gibt es in zwei Modellvarianten – 320 und 520x. Diese unterscheiden sich vor allem in ihrem Funktionsumfang.

Ziel

Nehmen Sie Ihre KundInnen mit auf eine Lichtreise durch ihre Hautschichten: Im Gegensatz zu einer Anamnese durch reine Beobachtung und Befragung, können Sie Ihre KundInnen mit dem Observ direkt am Prozess der Hautanalyse beteiligen. Das gemeinsame Sehen und Verstehen der plakativen Diagnose-Bilder hilft dabei, die Notwendigkeit des Behandlungsplans nachzuvollziehen.

Die vergleichenden Vorher-Nachher-Bildanalysen bieten Ihnen darüber hinaus ein perfektes Follow-up. Sie untermauern Ihre Fachkompetenz und stärken die KundInnenbindung.

Zielgruppe

Für alle Hauttypen und jedes Alter geeignet

Ideal für NeukundInnen, zur Hautanalyse vor der ersten Behandlung

Zur effektiven Kontrolle und Überwachung von Veränderungen des Hautzustands Ihrer BestandskundInnen




Alle Features auf einen Blick

KEY USP'S	8 Modi	Full Face Image	Observ App
MERKMAL	VORTEILE	NUTZEN	
8 Modi*	<ul style="list-style-type: none"> · Deckt für das Auge nicht sichtbare Hautstrukturen auf · Liefert klarere und kontrastreichere Bilder als herkömmliche Analysemethoden · Erleichtert die Hautanalyse und ermöglicht ein besseres Verständnis der Haut 	<ul style="list-style-type: none"> · Unterstützt Sie zuverlässig bei der Diagnose von Hautproblemen und deren Ursachen · Hilft Ihnen anschaulich bei der Prognose zukünftiger Hautveränderungen · Macht die von Ihnen erstellte Hautanalyse für Ihre KundInnen besser nachvollziehbar · Unterstützt Sie bei der Erstellung eines individuellen Pflege- und Behandlungsplans für Ihre KundInnen · Dank der bildbasierten, für Ihre KundInnen nachvollziehbaren Analyse, können Sie Ihren Umsatz nachhaltig steigern 	
Full Face Image*	<ul style="list-style-type: none"> · Durch die fünf fotografischen Winkel (-90°, -40°, 0°, +40°, +90°) haben Sie verschiedene Bildansichten zur besseren Kundenanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> · Durch Aufnahmen des ganzen Gesichts (auch Wangen, etc.) können Sie noch gezielter auf die Hautprobleme Ihrer KundInnen eingehen und sie ganzheitlich beraten 	
Face Positioning System	<ul style="list-style-type: none"> · Ergonomische Kinnstütze und Sensor ermöglichen ruckelfreie, detailscharfe Aufnahmen · Garantiert eine bequeme Haltung und einen unkomplizierten Ablauf für Ihre KundInnen · Sorgt für optimale Vergleichbarkeit von Vorher-Nachher-Bildern 	<ul style="list-style-type: none"> · Durch die schnellen und einfachen Aufnahmen haben Sie noch mehr Zeit für ein intensives Beratungsgespräch · Dank der ruckelfreien, detailscharfen Aufnahmen und dem gleichbleibenden Winkel können Sie und die KundIn über mehrere Behandlungen direkte Vorher-Nachher-Bilder optimal vergleichen 	
Ghost Function*	<ul style="list-style-type: none"> · Durch die Ghost Function können Sie ganz einfach ein identisches Nachher-Bild aufnehmen 	<ul style="list-style-type: none"> · Ihre KundIn kann die Wirksamkeit der Behandlung gemeinsam mit Ihnen beobachten und verstehen · Die visuelle Dokumentation stärkt das Vertrauen in Ihre Fachkompetenz, fördert KundInnentreue und Verkaufszahlen · Die bestehenden Treatments können modifiziert und bestmöglich auf die Bedürfnisse Ihrer KundInnen angepasst werden · Macht den Erfolg Ihres Pflegeplans direkt sichtbar 	
Observ App (iOS)	<ul style="list-style-type: none"> · Ermöglicht Ihnen eine optimale Beratung dank elektronischer Kundenkarteien und individuellen Lösungen 	<ul style="list-style-type: none"> · Profitieren Sie von der einfachen und intuitiven Bedienung der App · Übermittelt alle Details inkl. Bilder auf Wunsch an die KundInnen per E-Mail, so haben Sie alle Daten immer im Blick und die KundIn kann ihren Prozess festhalten 	
Individualisierung	<ul style="list-style-type: none"> · Erleichtert Ihnen die Auswahl individuell abgestimmter Pflegeprodukte auf die Bedürfnisse Ihrer KundInnen 	<ul style="list-style-type: none"> · Steigert Ihren Absatz durch die Empfehlung passender Produktgruppen, sowie Ihrer angebotenen Treatments 	

*Angaben gelten für OBSERV 520x

Wirkweise

Die Kombination aus patentierter Fluoreszenz-Technologie, verschiedenen Licht- und Polarisierungsfiltren zeigt den Hautzustand klarer und kontrastreicher als herkömmliche Analysemethoden. So bringen Sie selbst unsichtbare Ausprägungen des Hautzustandes ans Licht und können sogar zukünftige Probleme aufspüren, die noch gar nicht an der Oberfläche sichtbar sind.

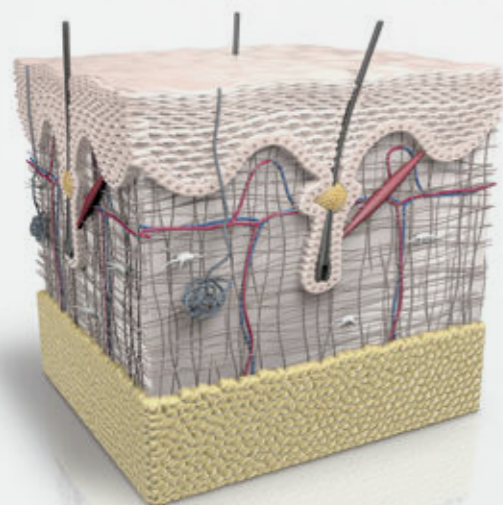

OBSERV® 320 & 520x

1. Tageslicht

Gleichmäßige Beleuchtung des Gesichts mit natürlichem, weichem Licht aus allen Richtungen ohne Schattenbildung. Ermöglicht eine klare Beurteilung des Gesamterscheinungsbildes der Gesichtshaut und des augenscheinlichen Alters. Erleichtert die Überwachung und Vergleichbarkeit bei Veränderungen des Hautbildes.



2. Oberflächentextur

Hebt die Oberflächentextur der Haut hervor und deckt Unebenheiten auf. Macht Porenstrukturen, unebene Haut, raue Flecken, feine Linien und Falten, Akne und Narbengewebe deutlicher sichtbar. Hilft bei der Erkennung früher Anzeichen der Alterung, trägt zum Verständnis des Mikroreliefs und der Struktur des Hautgewebes bei.



3. Pigmentierung

Hebt lokale Pigmentierungen, bekannte Hyperpigmentierungen und Hautverfärbungen hervor und ermöglicht somit eine bessere Wahrnehmung von Alter und Attraktivität der Haut. Hauttoninhomogenitäten lassen sich bei diesem Lichtmodus besser von Alterszeichen, wie Falten oder schlaffer Haut, unterscheiden.



4. Vaskularität

Hilft bei der „Wahrnehmung der Hautgesundheit“. Macht mikrovaskuläre Strukturen und Entzündungen in der Dermis deutlich sichtbar. Sowohl chronisch persistente als auch vorübergehende reaktive Rötungen können besser analysiert werden.



OBSERV 520x

5. Parallel Polarisiert

Durch die Verstärkung der spiegelnden Lichtreflexionen auf der Oberflächentextur der Haut werden die glyphischen Muster, die Verteilung des Hydrolipidfilms, Porenstrukturen, feine Oberflächentexturen und beginnende Falten im Detail sichtbar gemacht. Dieser Modus hilft bei der Diagnose von Hautzuständen, die mit dem Mikrorelief der Haut in Zusammenhang stehen, während die Sicht auf tieferliegende Gewebe vermindert werden.



6. Kreuzpolarisiert

Gewährt einen Blick in tiefere Hautschichten, da er störende Oberflächenreflexionen unterdrückt. Lässt Rötungen und Verfärbungen in der Haut erkennen, die sich unter der glänzenden Hautoberfläche verstecken und macht beispielsweise Couperose, Rosacea, Akne, Entzündungen, Pigmentierungen, Verfärbungen und sensibilisierte Hautbereiche sichtbar.



7. True UV-Modus

Projiziert unsichtbare UV-Strahlen in die Gesichtshaut, die im Innern von den Gewebszellen in sichtbares Licht umgewandelt werden. Visualisiert verborgene Hautzustände unter der Oberfläche, zum Beispiel die Talgdrüsenaktivität, die Porengesundheit, unterirdische Akneentzündungen und Narbengewebe sowie zukünftige Hautprobleme.



8. Schwarzlicht (Wood)

Moderne Variante der klassischen Schwarzlicht-Methode enthüllt die Hautlipidverteilung und die strukturelle Integrität der Haut. Visualisiert zukünftige Hautprobleme, aktive Talgdrüsen, die Verteilung des Ölfilms innerhalb des Gesichts sowie Trockenheit, entzündliche Stellen, Krankheitsherde und Pigmentveränderungen.



Die Observ-Modelle im Überblick



OBSERV® 320

Der Observ 320 richtet sich mit der Erscheinungsbildanalyse an KosmetikerInnen, die über Grundkenntnisse der Haut verfügen – das Gerät unterstützt Sie bei der Beratung und insbesondere bei der Empfehlung zu Hautpflegeprodukten für die häusliche Pflege.

ab 5.990 Euro iPad ist im Lieferumfang nicht enthalten

Kompatibel mit: iPad 2018 6. Generation, 2019 7. Generation, iPad Pro: 2015 Pro 12.9" 1. Generation, 2016 Pro 9.7", 2017 Pro 10.5", 2017 Pro 12.9" 2. Generation, 2018 Pro 11" 1. Generation, 2018 Pro 12.9" 3. Generation, 2020 Pro 11" 2. Generation, 2020 Pro 12.9" 4. Generation

OBSERV® 320



OBSERV® 520x

Bei dem Observ 520x gibt es neben der Erscheinungsbildanalyse auch die Hautanalyse. Dies ist besonders interessant, wenn Sie Ihre KundInnen und deren "Problemhaut" genau beobachten wollen. Die hochentwickelte Hautbeleuchtungstechnologie ermöglicht es Fachleuten alle Arten von Anomalien auf der Hautoberfläche zu diagnostizieren und darunter liegende Anomalien aufzudecken, bevor sie die Oberfläche erreichen.

ab 8.280 Euro iPad ist im Lieferumfang nicht enthalten

Kompatibel mit: 2017 Pro 10.5", 2017 Pro 12.9" 2. Generation, 2018 Pro 11" 1. Generation, 2018 Pro 12.9" 3. Generation, 2020 Pro 11" 2. Generation, 2020 Pro 12.9" 4. Generation

OBSERV® 520x



Technische Daten

Maße ohne Koffer: 32 x 43 x 63 cm

Maße mit Koffer: 46 x 45 x 19 cm

Gewicht: 11,2 kg

Leistung: 36 Watt

Spannung: Global 110-240 V, 50-60 Hz

Anzeige-Modi: Oberflächentextur, Pigmentierung, Vaskularität

LED Beleuchtungs-Modi:

Observ 320

Tageslicht

Observ 520x

Tageslicht, Kreuzpolarisiert, Parallel

Polarisiert, Schwarzlicht, True UV-Modus

Tabletsteuerung:

Observ 320

Aufnahmezeit durchschnittlich 5 Sek.

Observ 520x

Aufnahmezeit: durchschnittlich 10 Sek.



”
Einen Alltag ohne den Observ kann ich mir gar nicht mehr vorstellen! Dank seiner Überzeugungskraft habe ich meinen Produktabsatz deutlich gesteigert!

Regina Höfinger,
dermokosmetische Hautexpertin

”
Alle KundInnen lieben die Hautanalyse. Der Observ erleichtert die Auswahl der Produkte und Behandlungen um ein Vielfaches und zeigt sich auch deutlich am vermehrten Absatz der Produkte.

Verena Gufler,
dermokosmetische Hautexpertin

Da wird Ihre Haut aber Augen machen.

REVIDERM AG

Robert-Bosch-Str. 7
82054 Sauerlach
Germany
Tel.: + 49 8104 88 73 0
Fax: + 49 8104 88 73 999
info@reviderm.de

REVIDERM SWISS AG

Bahnhofstr. 59
6312 Steinhausen
Switzerland
Tel.: + 41 41 828 25 79
Fax: + 41 41 828 25 80
info@reviderm.ch

www.reviderm.com